


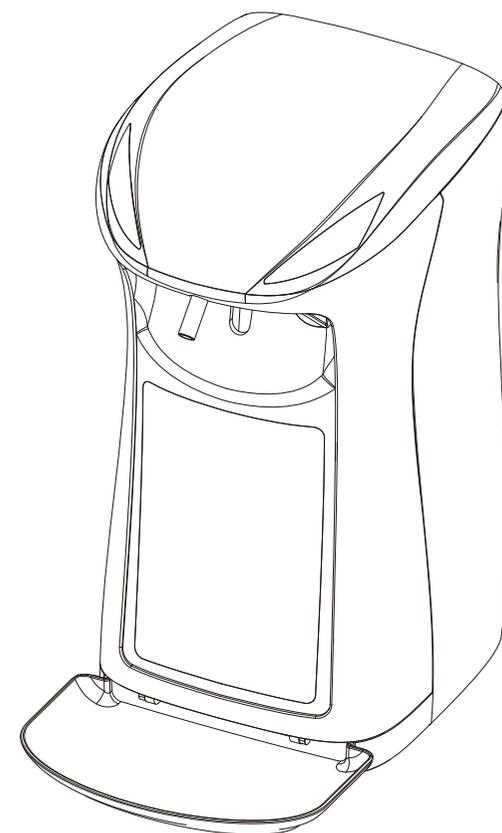

**MTF-151**

# 自動手動消毒/給皂機 使用說明書



**bsi Care**

博信國際有限公司

拜訪 [bsi-med.com](http://bsi-med.com)  
瀏覽更多最新資訊

聯絡我們

電話 06-5856617  
傳真 06-5850103

客服郵件 [webmaster@truflo.com.tw](mailto:webmaster@truflo.com.tw)  
公司地址 台南市善化區樹人路83號




MTF151MBCTW

## 產品構造介紹圖 外觀



## 產品構造介紹圖 內部

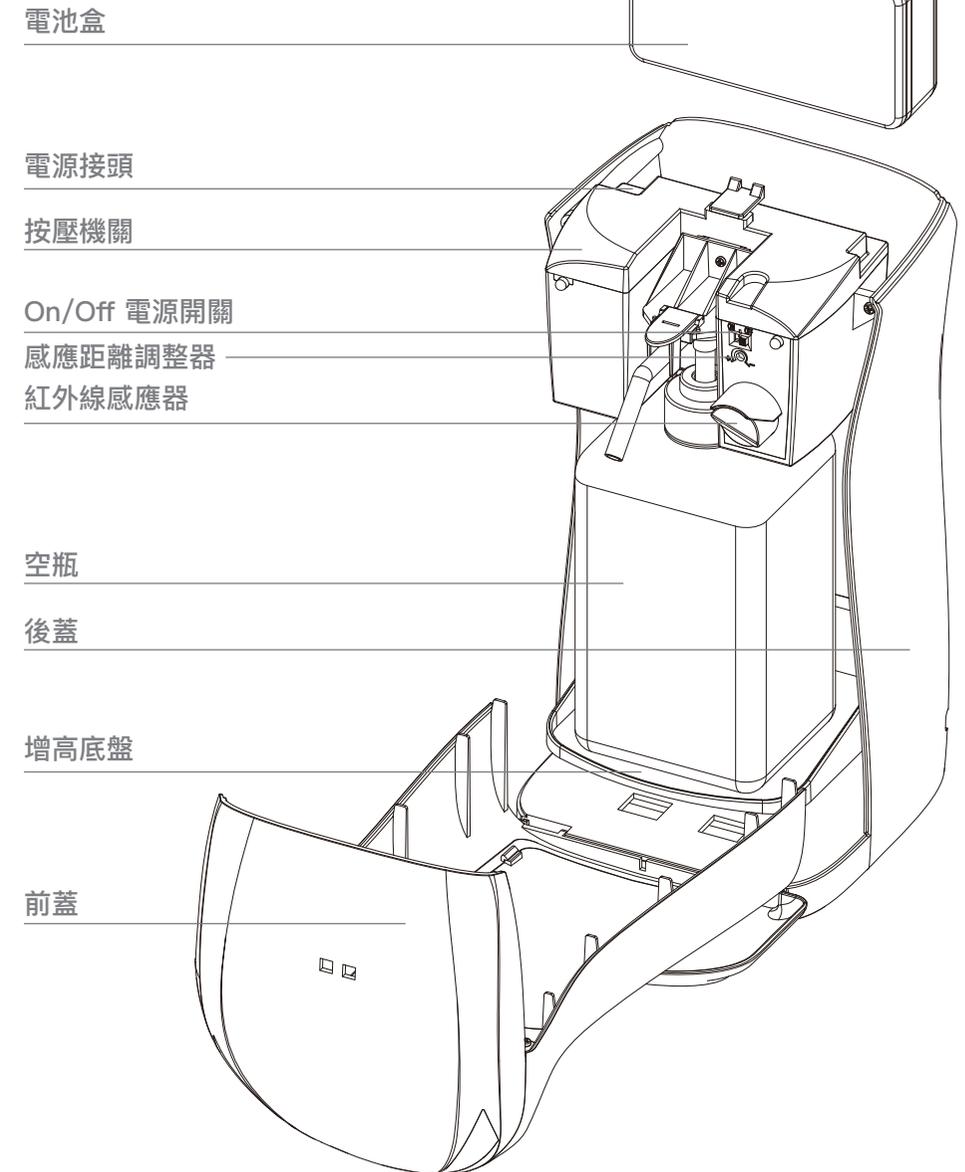


## 如何安裝

1. 站立於檯面上  
先將底部托盤裝上，再選一個平整且牢固的地方，將機器置放於檯面上即可。
2. 固定於牆面（如附圖）  
於欲安裝的牆面上，在適合的位置鑽四個孔。將塑膠壁虎塞入鑽好的孔內，並用螺絲將機器固定於牆上。

### △ 注意


為避免機器故障，請勿安裝機器於容易使機器潮濕的場所、太陽光照射的場所。

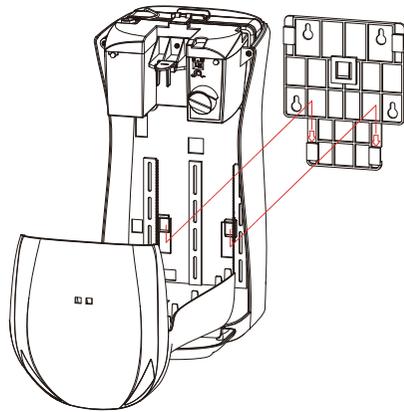

## 如何使用


### 使用前準備

1. 如何開啟前蓋：將鑰匙插入機器上方的鑰匙孔，將機器前蓋往後拉出。
2. 如何關閉前蓋：將機器前蓋往前卡緊。

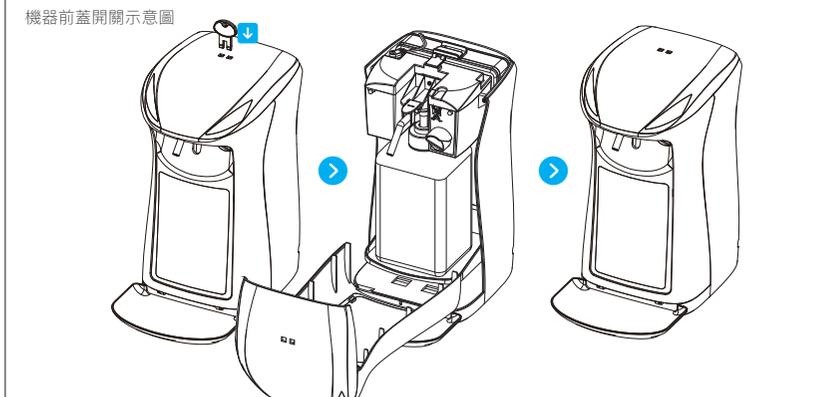

### 3. 如何連接電源

- 1.) 使用電池：開啟前蓋後，拔開電池盒插頭。將電池盒取出，並裝上四顆 1 號電池後，在將電池盒裝入機器並連接後，關閉前蓋。

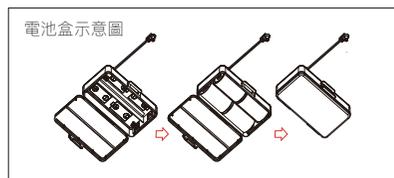

### △ 注意

為使機器達到最佳效果，建議使用全新鹼性電池。

- 2.) 使用外接電源：拔開電池盒插頭，將變壓器的電源插頭接上機器電源接頭，並將變壓器接上交流電源。

### 4. On/Off 電源開關

當您要使用機器時，將 On/Off 開關扳至 On 的位置。若長時間不使用機器，可將 On/Off 開關扳至 Off，以節約電源。

### 5. 皂液/消毒液安裝


- 1.) 將欲使用的皂液或消毒液裝入空瓶內，並依使用的液體裝上適合的押頭。
- 2.) 將裝好皂液或消毒液的瓶子放入機器，蓋上前蓋，並確認噴嘴有透過前蓋的噴嘴孔露出於前蓋外。

若使用較小空瓶，請使用增高底盤（選配）

- 1.) 先將空瓶放在增高底盤上，調整至適合的位置。
- 2.) 利用工具包內的十字螺絲由機器後方固定增高底盤。
- 3.) 將填充完成的瓶子，安裝至按壓機關可正常運作的位置。

### △ 注意

增高底盤非標準配件，另外販售。

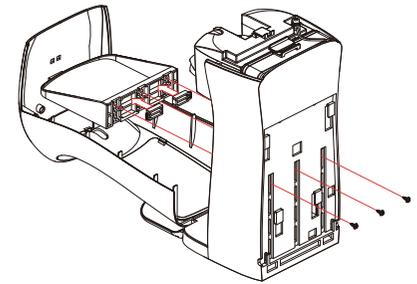

### 6. 感應距離調整

紅外線感應距離可依使用者需求自行調整。如需將感應距離調長，可使用螺絲起子緩緩將感應距離調開關逆時針方向旋轉。如需將感應距離調短，可使用螺絲起子緩緩將感應距離調開關順時針方向旋轉。



### △ 注意

若過度旋轉，將導致設備損壞。


### 7. LED 狀態燈

如液體噴出時快速閃黃燈表示機器正常運作，如異常請至第 5 頁之疑難排解。

### 使用裝置

請將手置放於噴嘴下方，紅外線感應裝置會自動偵測到使用者的手，並將皂液或消毒液噴出。

機器會依您的需求，自動偵測使用者的手並噴出皂液或消毒液 1 次或 2 次。如果使用者需要更多的皂液或消毒液，請移開手部 2 秒，然後重覆使用步驟。

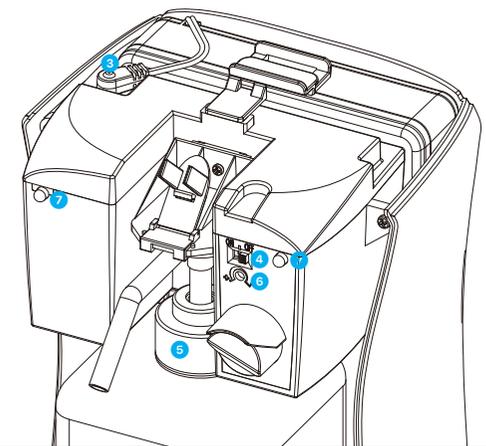

## 清潔及維護

1. 使用柔軟的布或紙巾清潔機器，必要時可將清潔用的布或紙巾稍微沾溼。
2. 請勿使用高黏度或含顆粒的液體，以避免機器管路阻塞。
3. 請勿直接以水沖洗機器或將機器浸泡於水中。
4. 請勿將機器安裝於陽光直射處。

## 疑難排解 依照LED狀態燈

● 持續亮紅燈	表示電力已低於可工作的電壓，請更換新電池。
● 未亮起	檢查前蓋是否正確的蓋上或電池是否正確的裝上。
● 紅燈閃爍	將手移開感應區，並重新取用。
● 黃燈閃爍	檢查並確認押頭與瓶子是否有旋緊密合；將噴頭多餘的空氣排出。
● 紅黃燈同時亮	機器故障。

## ⚠ 安全使用說明

### 安全地使用此裝置

- 禁止放至任何物品於機器上方。
- 不要將機器暴露於日光下、禁止接近火源。以免起火、造成火災。
- 避免將臉靠近機器，以免造成消毒液噴入眼中。
- 避免讓砂石等異物近入瓶內，以免造成噴嘴堵塞。
- 本機並非防水構造，請不要於潮濕的地方使用。
- 請使用 1 號電池，安裝時請注意電池正負極，正確安裝。
- 本產品設計為室內使用，請勿安裝於室外。若暴露於陽光下，本機器可能無法使用。
- 若長時間不使用，請將電池取下。
- 當需要搬移機器時，請先將裝有溶液的瓶子取出。

### 安全地使用溶液

- 使用消毒液前，請仔細詳讀使用說明。
- 請勿添加強酸、強鹼等具腐蝕性藥劑。
- 如果消毒液溢出時，請立即以乾布擦拭乾淨。
- 如果不小心消毒液噴入眼睛，請立即以水沖洗眼睛。如沖水後仍有不適，請立即就醫。
- 禁止飲用消毒液，並且將消毒液放置於小孩無法觸及的地方。
- 請使用合法安全的消毒液體。
- 消毒液請遠離火源，以免起火。

## 產品規格

產品型號	MTF-151	
產品名稱	自動手部消毒 / 給皂機	
尺寸	168(W)×154(D)×310(H)mm; 168(W)×238(D)×310(H)mm (含底部托盤)	
重量	1,250 克 (空機，不含容繼、電池、零件等)	
材質	前蓋	ABS
	機身	ABS
	底部托盤、增高底盤	ABS
	透視窗	PC
瓶子容量	2,450 毫升	
動力來源	4 顆 1 號電池 / 電源變壓器	
安裝方式	可單獨至於桌上或固定於牆上	

### 標準配件

自動手部消毒 / 給皂機	1 臺
噴霧凝膠兩用壓頭	1 個
空瓶	1 個
底部托盤	1 個
鑰匙	2 支
使用說明書	1 本
安裝工具組	4 組

### 選購配件

AC/ DC 電源變壓器 輸入：AC100~240V 輸出：DC6V/1A	
1 號電池	4 顆
增高底盤	1 個

## 保固 本機自購買日起，於正常使用下保固一年。若人為因素造成損壞，恕不保固。

購買日期	
機身序號	